



ELECTROCAUTERIO PORTATIL

DE ALTA TEMPERATURA

cotizaciones@medicaw.com

medicaw.com



DESCRIPCIÓN:

Electrocauterio Portátil con 1 a 4 Puntas (a elección del cliente)

Kit para cauterización de alta temperatura, consta de un mango reutilizable de aluminio con forma cilíndrica, con un interruptor de Encendido/Apagado redondo de 10mm de diámetro, con dos pines hembra en la punta del mismo con una distancia de separación entre sí de 3mm con material aislante eléctrico, dichos pines conforman la conexión con las puntas intercambiables del cauterio, en el interior del mango se introducen baterías "AA" de 1.5V no recargables (baterías recargables opcionales), necesarias para el pleno funcionamiento del cauterio, que se sellan con una tapa cilíndrica de 17 mm de diámetro atravesada por un perno utilizado para el sellado hermético de las baterías al interior del mango, el kit también consta de puntas intercambiables diseñadas específicamente para un procedimiento adecuado de vasectomía sin bisturí.

FUNCIONES:

- Utilizado frecuentemente para diferentes procedimientos, como punta de hemostasis y evacuación de hematomas sublinguales.

- Para el control de sangrado difuso y modelar los injertos de tejido.

- Diseñado para el eficiente sellado o cauterización de los conductos deferentes en la práctica del procedimiento de Vasectomía sin bisturí.



SEGURIDAD:

- El cauterio funciona calentando la punta del cauterio con corriente eléctrica de bajo voltaje suministrada por las baterías.
- Tenga cuidado al tocar la punta para evitar presionar inadvertidamente el interruptor de activación y crear un peligro de quemaduras.
- Los mangos nunca deben almacenarse con una punta de cauterio colocada, ya que podría provocar una activación accidental durante el almacenamiento creando peligro de incendio
- Al final de su vida útil las baterías deben retirarse del mango y desecharse por separado.
- La punta del cauterizador permanece caliente durante un período de tiempo después de su uso y no debe desecharse hasta que se enfríe.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Fabricado para soportar altas temperaturas, hasta 1204° C (2200° F), aproximadamente.
- Compuesto por un lápiz que aloja pilas alcalinas intercambiables una vez que se agotan.
- Dimensiones del mango: Largo 186 mm, Ancho/Diámetro: 17 mm.
- Dimensiones de la punta: Longitud 45 mm.
- Baterías incluidas (No recargables).



Punta para electricaoterio



ADVANCED[®]
BY MEDICA W

AVALADOS Y CERTIFICADOS POR:



Electrocauterio

**1 AÑO DE GARANTÍA
POR DEFECTOS DE
FABRICACIÓN, MATERIAL
Y/O INSTALACIÓN O
SEGÚN APLIQUE.**



MEDICA W[®]
al servicio de la salud.



Lodi #1498, Fracc. Gran Venecia C.P. 21353
Mexicali, Baja California, México.



cotizaciones@medicaw.com



+52 (686) 355 1070



+52 (686) 355 1070
+52 (55) 1898 0256



www.medicaw.com

